

いつも、インシデント報告ありがとうございます

京大病院医療安全情報22

胸腔ドレーンバック（メラアクアコンフォート）の準備不備が続いています

こんな事例がありました

- ①ドレーンバックの交換時、医療者2人でドレーンバックを準備し交換。その際、水封部に注射用水を入れ忘れ設置。患者は一時的に気胸になった
- ②レントゲン検査の前に胸腔ドレーンを交換。帰室時ドレーンバックをみると吸引圧設定の水が入っていなかった



青い水（水封）と
黄色い水（吸引圧）
は入ってますか？
確認して下さい

※吸引圧の水は医師の指示に従って下さい

使用方法が分からない時は必ず
説明文書を読み、確認の上、ご使用下さい