

いつも、インシデント報告ありがとうございます

2013.6.6

京大病院医療安全情報35

【電気メスでの熱傷】

PMDA（医薬品医療機器総合機構）
の医療安全情報から抜粋します。


POINT 安全使用のために注意するポイント

（事例1）扁桃摘出術を施行中、口角に予期せぬ熱傷が発生した。絶縁型のバイポーラピンセットだと思って使用していたが、確認すると非絶縁型であった。

1 バイポーラ電気メス使用時の注意点について その1

- バイポーラピンセットには、絶縁型と非絶縁型があるため、確認して使用すること。
- バイポーラピンセットを使用する際には、目的部位以外に接触させないように注意すること。

非絶縁型バイポーラピンセット

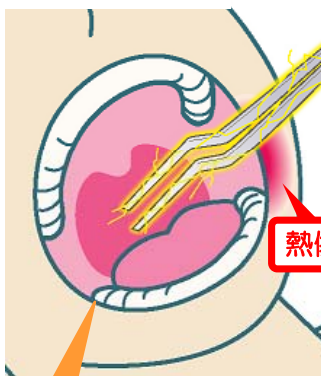


熱傷が発生！



ピンセット全体の
金属が露出

絶縁型バイポーラピンセット

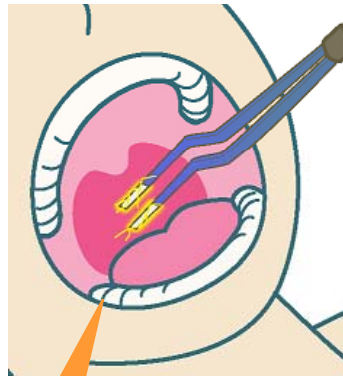


絶縁コーティングされており
ピンセット先端のみ金属が露出

絶縁体コーティングのない ピンセットが院内にあります




絶縁体コーティングが**ない**ピンセット

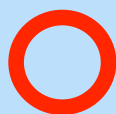

絶縁体コーティングが**ある**ピンセット



絶縁体コーティングが**剥がれている**ピンセット

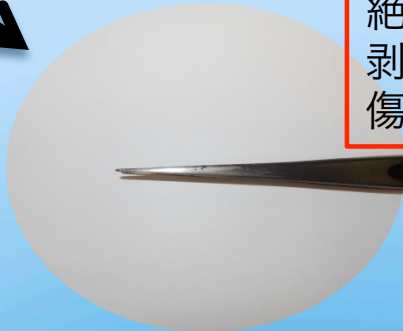

絶縁体コーティングが剥がれている部分で熱傷の危険があります

現在、根本対策を検討中であり、使用の際にはご注意ください

医療安全管理室・医療器材部作成