


いつも、インシデント報告ありがとうございます。

2011.9.20

京大病院医療安全情報⑤ 【クオンティフェロン採血不備】

【クオンティフェロン検査は採血量が厳密です】

【インシデント】 採血量が基準より多い，または，少ない

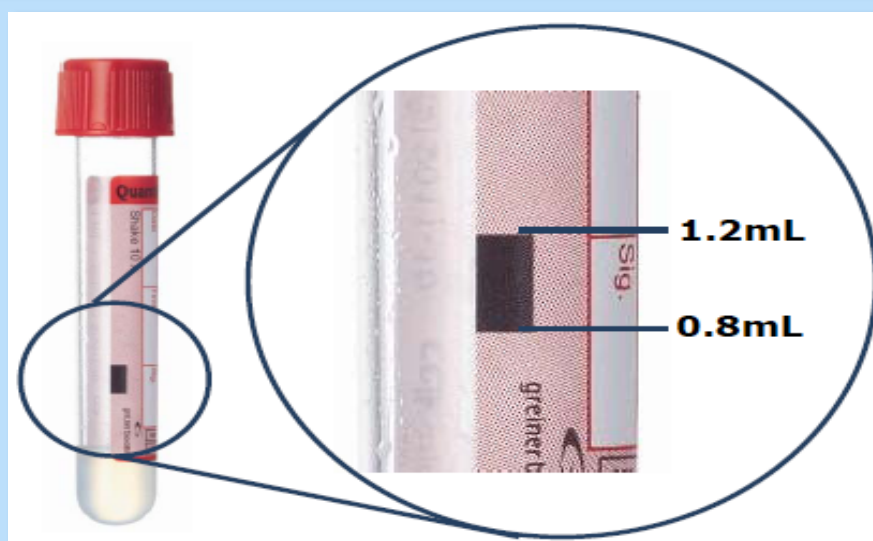

採血管1本当たりのコストは500円です。

検査には1 mLが3本必要です。採血量は、0.8から1.2mLの間しか受付できません。

真空圧が弱いので、翼状針採血の場合は、ダミー管でエア抜きをしてください。

クオンティフェロン検査 の注意点

【注意点】

- ①検査には、採血管に検体が1 mLずつ3本必要。
- ②採血後に、各採血管を10回程度転倒混和する。
- ③採血時間を必ず明記する（採血後15時間以内に検査しないとデータが得られないため）。

【検体回収方法—病棟—】

- ①検査部に搬送（和進会が搬送）
月～金の9:00-15:00
- ②ファルコに直接電話（771-6006）
月～金の15:00以降または土曜日の9:00-16:00

【検体回収方法—外来—】

- ①外来で採取した場合には、検査室に搬送
- ②なるべく採血室での採血をお願いします。

